



Q

ケンツメディコはどんな会社ですか？

A

(株)スズケンのグループ会社です。スズケングループの連結決算は**2兆円**を超えていきます。スズケングループは製薬会社、薬局、医療機器、介護事業など**メディカルに特化**した企業です。  
**創業87周年**を迎えました。

Q

聴診器はどこで作られているんですか？

A

部品の鍛造から成型、組立、梱包の全てを日本国内で行っている数少ない  
**Made in Japan 聴診器メーカー**です。  
日本の先生方と共同研究を行いながら、製品開発を行っております。

Q

聴診器シェアはどれくらいですか？

A

2019年度矢野経済研究所という専門の調査会社調べによると、

**シェア率は約33%の第2位**です。

まだまだ知名度は低いですが、聴診に熱心な先生、聴診のスペシャリスト、専門医の先生方に支持されています。

Q

販売会で購入するメリットは何ですか？

A

共同購入特典がついてきます。1、「聴診学習用サイトログイン用ID発行」、  
2、「レーザ名入れ刻印無料」、3、「医学部在学中保証」(ドクターフォネットネオ No.188Ⅲのバネ折れは**10年間保証**)、4、「学生特別価格で販売」の4点です。



**Q** 色々な聴診器があってどれがいいのか分かりません。  
どの聴診器を選べばいいですか。

**A Point.1 耳回り構造**


「マスクの紐、眼鏡のつるが痛い。」、「イヤホンが耳に合わない。」  
耳にまつわるストレスを感じたことがありませんか？聴診器もご自身の  
耳に合っていないと、「耳が痛い。」、「よく聴こえない。」といった  
トラブルがありますので、付け比べてみてください。

ケンツメディコ聴診器はそんなトラブルが減るように様々な工夫をして  
います。

**■耳管の角度調節が可能**

外耳道の角度は人それぞれ異なります。可動式により、どなたの耳で  
も最適な角度で挿入が可能です。

「ぐっと押し出すと前向き」、  
「ぐっと引くと後ろ向き」になります。

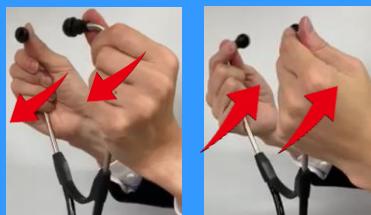

【YouTube】  
耳管の角度調節

**■バネの圧着加減調節可能**

バネ圧がきつい聴診器は短時間で耳が痛くなります。ケンツメディコ  
聴診器は圧着加減を調節できますので、バネ圧がきつかったら広げ、  
緩かったら握ってください。

万が一のバネ折れは**10年間無償対応**  
致します。



【YouTube】  
バネの圧着加減調節

**■選べるイヤピース**

2種類異なるサイズ(大小)のイヤピース合計4個が**全て標準付属**で付  
いてきます。



【YouTube】  
回転ソフトイヤピース



Q

色々な聴診器があってどれがいいのか分かりません。  
どの聴診器を選べばいいですか。

A


## Point.2 音

2種類の異なる特徴をもつダイアフラム(成人用・小児用)が全て標準付属品で付いてきます。

### ■(一体型)サスペンデッド型ダイアフラム面

周波数帯域

循環器・一般内科向け。

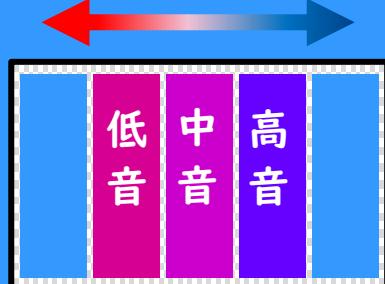

軽くあてると**低音**　強くあてると**高音**

### ■スタンダード型ダイアフラム面

周波数帯域

呼吸器の先生から高い評価を頂いています。

**中高音～超高音**までが鮮明です。例えば  
肺音・呼吸音といった高音の異常音を鮮明に  
聴診できます。



先生方は専門分野によって、これらの中から適切なダイアフラムの聴診器を選ばれますが、医学生の皆さんの場合は、これから全診療科をまわるわけですから、低音域も高音域も、幅広い音域をカバーできる聴診器がいいと思います。



# Q ドクターフォネットネオⅢとフレアーフォネットⅢの違いは？

## A ①チェストピースの大きさ

ドクターフォネットネオⅢは、フレアーフォネットⅢと比べ面積が大きく、ベルの堀が大きいです。  
よりしっかりと音を拾います。



ドクターフォネット  
ネオⅢ



フレアーフォネットⅢ

## ②チューブ構造

ドクターフォネットネオⅢは、1本のチューブの中に2つの通り道があるツーインワンチューブ。音の干渉や減衰が少ない仕様です。  
フレアーフォネットⅢは、一般的なシングルチューブになります。



ツーインワンチューブ



シングルチューブ

## ③バネの構造

ドクターフォネットネオⅡは、焼き入れ技術を応用してつくられており、強靱にできています。  
万が一のバネ折れは、10年保証をしています。  
フレアーフォネットⅢは、一般的な内バネになり、  
バネ折れ保証はしていません。



**Q**

人気の色は何色ですか？

**A**

ドクターフォネットネオⅢ

第1位：ダークネイビー 第2位：ブラック 第3位：バーガンディ

男性はダークネイビー、ブラック、ブラックエディション

女性はダークネイビー、バーガンディ、パールプラムが人気です。

フレアーフォネットⅢ

第1位：バーガンディ 第2位：ブラック 第3位：セイルブルー

**Q**

オススメの色は何色ですか？

**A**

落ち着いたダーク系（ブラック・ダークネイビーなど）をオススメしています。

汚れが目立ちにくいのは勿論ですが、派手な色だと患者様への印象が悪くなってしまったり、先生方に指摘される場合もあるそうです。

**Q**

販売価格がこんなに安いのはなぜですか？

**A**

弊社の聴診器は、自社工場でつくっており、コストを最大限にカットし、生協さまにもご協力いただきご提供させていただいております。

決して「安かろう、悪かろう」ではございませんので、ご安心ください。